

Hinweise

- Aus 97% Baumwolle und 3% Elasthan (tape original)
- Aus 97% Viskose und 3 % Elasthan (tape original plus)
- Frei von Latex und Medikamenten
- Luft- und wasserdurchlässig, sowie atmungsaktiv
- Hervorragende Haftung im Wasser
- Schränkt die Bewegung nicht ein

Nicht anzuwenden bei:

- Frischen Verletzungen der Haut oder offene Wunden
- Gerinnungsstörungen
- Gefäßpathologien (Thrombose)
- Akute, chronische Hauterkrankungen
- Allergien gegen einen der Inhaltstoffe im Tape oder Acrylkleber (zunächst an einer kleinen Hautstelle testen)
- Maligne Tumore
- Schwangere dürfen das Tape nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt verwenden.
- Patienten in Krebsbehandlung
- Sollte durch das Anwenden des Tapes es zu Hautirritationen kommen, entfernen Sie das Tape vorsichtig.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Körperstellen, die schwer zu erreichen sind, sollte das Tape vom entsprechenden Fachpersonal angebracht werden.

Allgemeine Hinweise zu der Anlage von Tape:

- 1) Die Haut vor der Anwendung mit tape original Hautreinigung von Cremerückständen und anderen Verunreinigungen befreien.
- 2) Das Tape nur auf trockene und saubere Haut anlegen
- 3) Lokalisieren Sie den entsprechenden Muskelbereich
- 4) Messen Sie die entsprechende Länge des Tapes ab
- 5) Runden Sie die Ecken ab, um vorzeitiges Ablösen zu verhindern
- 6) Lösen Sie das Trägerpapier ca. 3-4cm vom Tape ab
- 7) Kleben Sie das Tape entsprechend Ihren Beschwerden auf die Haut
 - Das Tape muss vor der Anlage warm gerieben werden, um den Kleber zu aktivieren
 - Das Tape sollte mindestens 30-60min vor sportlichen Aktivitäten angelegt werden
 - Das Tape zum Trocknen nur leicht abtupfen
- 8) Das Tape immer in Richtung des Haarwuchses und nicht ruckartig entfernen.

Lagerung

- Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zwischen 8°C und 25°C lagern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.